



# Korte Handleiding Voor De Omnipod® Gebruiker

## Een Bolus Toedienen

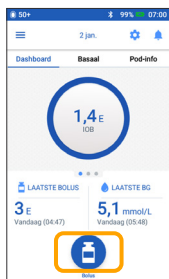

1. > Tik op het pictogram Bolus op het startscherm

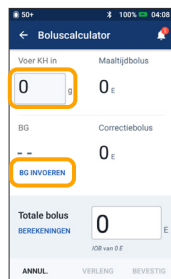


2. > Voer het aantal gram koolhydraten in (als u gaat eten)  
> Tik op "BG INVOEREN"



3. > Voer uw BG (bloedglucose) handmatig in  
> Tik op "TOEV. AAN CALC."




4. > Tik op "BEVESTIG" als u hebt gecontroleerd dat uw ingevoerde waarden correct zijn

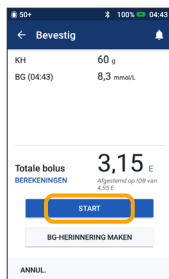


5. > Tik op "START" om de bolustoediening te starten

### Herinnering


Als u een onmiddellijke bolus geeft, zijn op het startscherm de gegevens en een voortgangsbalk te zien. U kunt uw Omnipod DASH®-PDM niet gebruiken tijdens een onmiddellijke bolus.

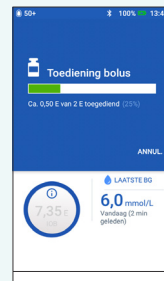


## Een Tijdelijke Basaalsnelheid Instellen

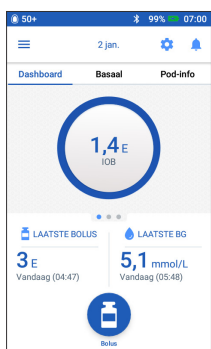

1. > Tik op het startscherm op het pictogram Menu

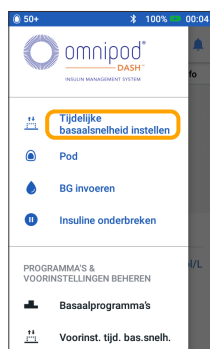

2. > Tik op "Tijdelijke basaalsnelheid instellen"

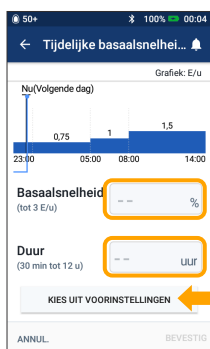


3. > Tik op het invoervak voor Basaalsnelheid en kies de gewenste wijziging (in %)  
> Tik op het invoervak voor Duur en kies de gewenste tijdsduur  
> Of tik op "KIES UIT VOORINSTELLINGEN" (als u voorinstellingen hebt opgeslagen)




4. > Tik op "ACTIVEREN" als u hebt gecontroleerd dat uw ingevoerde waarden correct zijn

### Wist u dit?


- > Tijdelijke basaalsnelheid is groen gemarkeerd als er een actieve tijdelijke basaalsnelheid loopt.
- > U kunt een groen bevestigingsbericht altijd naar rechts vegen om het snel te laten verdwijnen.

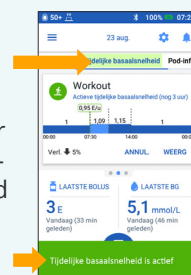


## Onderbreken En Hervatten Van Insulinetoediening

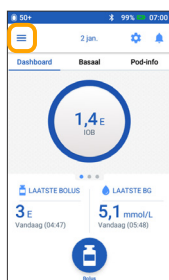


1. > Tik op het startscherm op het pictogram Menu

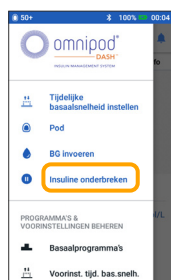

2. > Tik op "Insuline onderbreken"

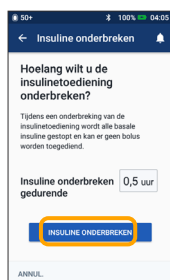

3. > Scroll naar de gewenste duur van insulineonderbreking  
> Tik op "INSULINE ONDERBREKEN"  
> Tik op "Ja" om de insulinetoediening te stoppen

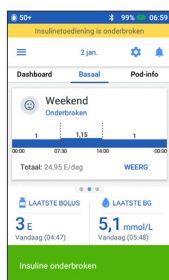

4. > Het startscherm toont in een gele balk de mededeling dat de insulinetoediening is onderbroken



5. > Tik op "INSULINE HERVATTEN" om de insulinetoediening weer te starten




### Herinnering

- > U MOET de insulinetoediening hervatten. Dit gebeurt na een onderbreking niet automatisch.
- > Gedurende de onderbrekingsperiode piept de Pod elke 15 minuten om u eraan te herinneren dat er geen insuline wordt toegediend.
- > Verlengde bolussen en tijdelijke basaalsnelheden worden geannuleerd als u de insulinetoediening onderbreekt.

# Korte Handleiding Voor De Omnipod® Gebruiker

## Een Pod Vervangen

Zie de handleiding van het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem voor uitgebreide instructies

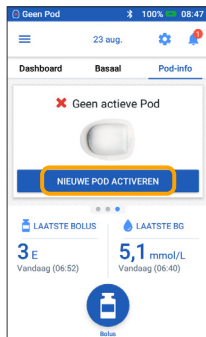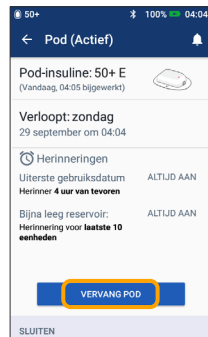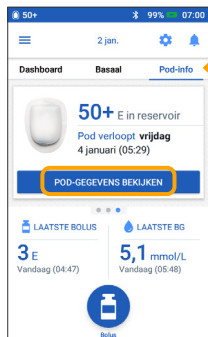

1. > Tik op het startscherm op "Pod-info"  
> Tik op "POD-GEGEVENS BEKIJKEN"

2. > Tik op "VERVANG POD"  
> Volg de aanwijzingen op het scherm nauwkeurig op  
> Pod wordt uitgeschakeld




3. > Tik op "NIEUWE POD ACTIVEREN"

4. > Volg de aanwijzingen op het scherm nauwkeurig op

### Denk hieraan!

- > Laat de Pod in het plastic bakje zitten tijdens het vullen en klaarmaken.
- > Plaats de Pod en Omnipod DASH®-PDM tegen elkaar aan tijdens het voorvullen.

## Geschiedenis Insulinetoediening En Bloedglucosewaarden Bekijken

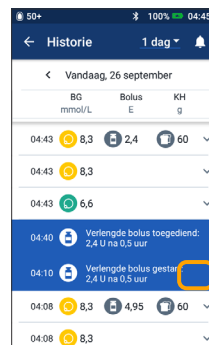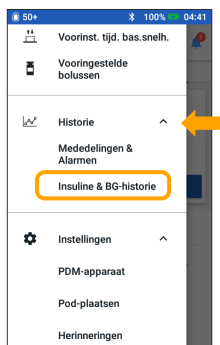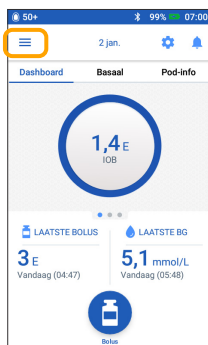

1. > Tik op het startscherm op het pictogram Menu

2. > Tik op "Historie" om de lijst te openen  
> Tik op "Insuline & BG-historie"

3. > Tik op de pijl omlaag om de geschiedenis van 1 dag of meerdere dagen weer te geven

4. > Veeg verder naar boven om het scherm met gegevens te bekijken  
> Tik op de pijl omlaag om meer gegevens te tonen

### Uw geschiedenis eenvoudig bij de hand!

- > Informatie BG:
  - Gemiddelde BG
  - BG's binnen bereik
  - BG's boven en onder bereik
  - Gemiddeld aantal metingen per dag
  - Totaal BG's (op die dag of in die periode)
  - Hoogste en laagste BG
- > Informatie insulinetoediening:
  - Totaal insuline
  - Gem. totale hoeve. insuline (in die periode)
  - Gemiddelde basaalinsuline
  - Gem. Bolusinsuline
  - Gem. Totaal KH
- > Gebeurtenissen Omnipod DASH®-PDM of -Pod:
  - Verlengde bolus
  - Activering/heractivering van een basaalprogramma
  - Start/stop/annulering van een tijdelijke basaalnelheid
  - Pod geactiveerd of gedeactiveerd

**Belangrijke veiligheidsinformatie:** Het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem is bestemd voor het met vaste en variabele snelheden subcutaan toedienen van insuline voor de behandeling van diabetes mellitus bij mensen die insuline nodig hebben. Het Omnipod DASH®-systeem is getest en veilig bevonden voor gebruik met de volgende soorten U-100-insuline: Novolog®/NovoRapid®, Humalog®, Fiasp®, Admelog® of Apidra®. Zie de gebruikershandleiding voor het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem voor de volledige veiligheidsinformatie, waaronder indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, aandachtspunten en instructies.

De afbeeldingen van de Persoonlijke Diabetesmanager zijn puur illustratief bedoeld en niet als aanbevelingen voor gebruikersinstellingen.

De gebruikershandleiding voor het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem is online verkrijgbaar op: [www.omnipod.com](http://www.omnipod.com), of bel de klantenservice van Omnipod® (24 uur per dag, 7 dagen per week) op: 0800 0229512 (Buiten Nederland 00 31 20 798 9337). Deze korte handleiding voor de Omnipod® Gebruiker geldt voor de Persoonlijke Diabetesmanager van het type PDM-INT2-D001-MM. Het PDM-typenummer staat afgedrukt op de achterzijde van elke Persoonlijke Diabetesmanager.

©2020 Insulet Corporation. Omnipod, het Omnipod-logo, DASH en het DASH-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de VS en diverse andere rechtsgebieden. Alle rechten voorbehouden. 1 King St, Hammersmith, London W6 9HR. INS-ODS-09-2019-00134 V2

