

OVERZETTEN VAN UW OMNIPOD DASH™ INSTELLINGEN

Om uw vervangende Omnipod DASH™ Persoonlijke Diabetesmanager in te kunnen stellen, hebt u uw huidige instellingen voor insuline nodig. Om uw insuline instellingen uit uw huidige Omnipod DASH™ PDM te halen, volg stap 1 tot 4 hieronder.

Wanneer u klaar bent om uw vervangende Omnipod DASH™ PDM in te stellen, leg alstublieft het volgende klaar:


- + Omnipod DASH™ PDM die momenteel wordt gebruikt
- + Vervangende Omnipod DASH™ PDM
- + Een kopie van uw insuline instellingen. U kunt uw instellingen verkrijgen door:
 - + Uw huidige Omnipod DASH™ PDM instellingen te bekijken
 - + Contact op te nemen met uw diabetesverpleegkundige
- + Een nieuwe Pod
- + Insuline
- + Alcoholdoekjes

 **Het is erg belangrijk dat u de insulinepomp accuraat instelt. De verkeerde instellingen kunnen leiden tot ernstige schade.**


Stap 1 Noteer uw bloedglucosewaardebereik van uw huidige Omnipod DASH™ PDM.

BG DOELBEREIK		
BG-doelbereik:	Onder: _____ mmol/L	Boven: _____ mmol/L


Stap 2 Schrijf uw basaalprogramma instellingen op

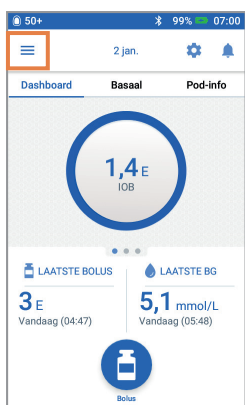


1. Vanaf het Home-scherm tik op het menupictogram

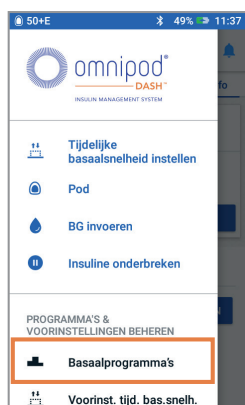

2. Tik op "Basaalprogramma's"

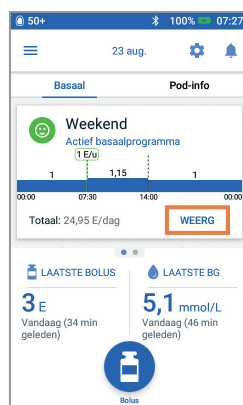

3. Tik "wijzig" om om het basaalprogramma te bekijken. Als u een actieve Pod heeft, moet u op "ISULINE ONDERBREKEN" tikken om het basaalprogramma te bekijken. Bekijk programma-naam/label. Tik op "VOLGENDE"

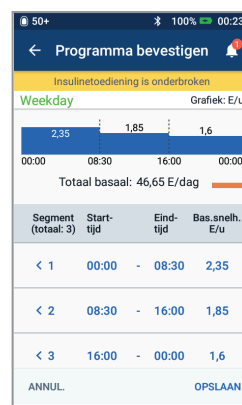

4. Bekijk en schrijf op Basaal segmenten, waarden en totale basaalhoeveelheden kunt u vinden op dit scherm. Blader naar beneden om alle segmenten voor de hele dag (24 uur) toe te voegen. Tik op "ANNULEER". Als u uw insulinetoeiding hebt onderbroken, moet u op "INSULINE HERVATTEN" tikken om de basale insulinetoeiding te hervatten.


BASAALINSTELLINGEN		
Basaal 1 programma (☰ > Instellingen > Basaalprogramma's)	Tijdssegment	Basaalsnelheid
	00:00 - _____	_____ E/u
	_____ - _____	_____ E/u
	_____ - _____	_____ E/u
Totale basaal _____ E/dag		
Max Basaalsnelheid (☰ > Instellingen > Basaal & Tijdelijke Basal)		_____ E/u
Tijdelijke basaalsnelheid (☰ > Instellingen > Basaal & Tijdelijke Basal)	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> UIT	

Opmerking: Als u meerdere basaalprogramma's hebt, kunt u de stappen hierboven herhalen voor elk programma.


Voor uw veiligheid, wanneer u de vervangende DASH™ PDM instelt met basaalprogramma's, controleer meermaals of de totale basaal hoeveelheden overeen komen in beide PDM's

Stap 3 Schrijf uw bolus instellingen op

1. Vanaf het Home-scherm tik op het menu icoon

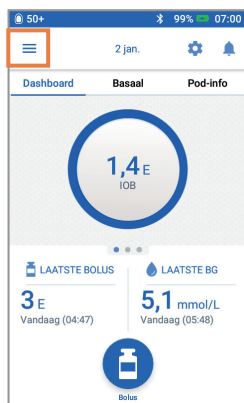

2. Tik op 'Instellingen' om de lijst uit te klappen. Tik op "Bolus"

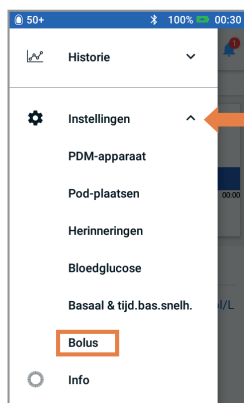

3. Tik op elke bolus instelling. Schrijf alle details op voor elke instelling die in de tabel staat. Vergeet niet om naar beneden te scrollen om alle bolus instellingen toe te voegen



BOLUS INSTELLINGEN (☰ >Instellingen>Bolus)			
Bolus calculator	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> UIT		
Streefwaarde voor BG & corrigeren boven	Tijdsegment	Streefwaarde voor BG	corrigeren boven
	00:00 - _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L
	_____ - _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L
	_____ - _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L
Min. BG - voor berekeningen	_____ mmol/L		
Insuline-tot-koolhydraat-verhouding (I/KH)	Tijdsegment	1 insuline-eenheid is voldoende voor	
	00:00 - _____	_____ g	
	_____ - _____	_____ g	
	_____ - _____	_____ g	
Correctiefactor	Tijdsegment	1 insuline-eenheid doet BG dalen met	
	00:00 - _____	_____ mmol/L	
	_____ - _____	_____ mmol/L	
	_____ - _____	_____ mmol/L	
Tegenovergestelde correctie	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> UIT		
Duur van de insulineactie	_____ uur		
Maximale bolus	_____ eenheden		
Verlengde bolus	<input type="checkbox"/> AAN <input type="checkbox"/> UIT		

Stap 4 Extra instellingen - Voorinstellingen en herinneringen


Als u momenteel de Voorinstellingen gebruikt, raden we aan om deze op te schrijven om ze over te nemen van uw Omnipod DASH™ PDM die u nu gebruikt naar uw vervangende Omnipod DASH™ PDM

Voorinstellingen

1. Vanaf het Home-scherm tik op het menupictogram




2. Blader naar "Programma's en voorinstellingen beheren". U kunt uw voorinstellingen bekijken door te tikken op "tijdelijke basaal voorinstellingen" en/of "bolus voorinstellingen". Schrijf uw voorinstellingen op zodat u ze in kunt voeren in uw vervangende PDM.

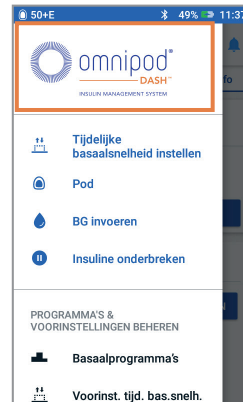


Herinneringen

Om uw routine zoveel mogelijk te behouden is het handig om dezelfde Herinneringen in uw vervangende Omnipod DASH™ PDM in te voeren.


1. Vanaf het Home-scherm tik op het menupictogram

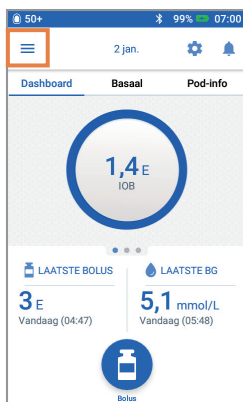

2. Tik op "Instellingen". Tik dan op "Herinneringen"

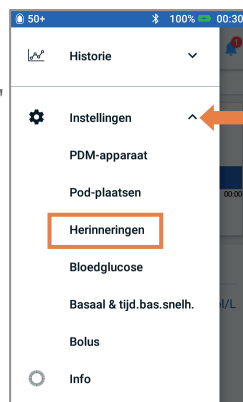


3. Tik op elke herinnering. Schrijf alle details op van elke herinnering. Vergeet niet om naar beneden te bladeren om alle herinneringen toe te voegen

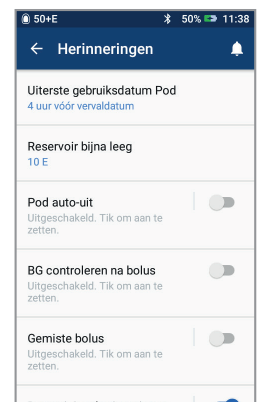

EXTRA INSTELLINGEN - voorinstellingen, Herinneringen

Voorinstellingen (☰ > Instellingen > PROGRAMMA'S & VOORINSTELLINGEN BEHEREN)

Herinneringen (☰ > Instellingen > Herinneringen)

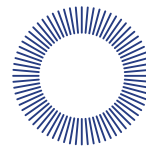

omnipod[®]
DASH™

INSULIN MANAGEMENT SYSTEM



Nu u uw insulinepompinstellingen heeft opgeschreven in deze gids, bent u klaar om de stappen te volgen om de vervangende Omnipod DASH™ PDM voor de eerste keer in te stellen. Vergeet niet dat het belangrijk is dat u alle insulinepompinstellingen accuraat invoert. De verkeerde instellingen invoeren kan tot serieus letsel leiden. U kunt overwegen om een vriend of familielid te vragen om dubbel te controleren of u de instellingen accuraat heeft ingevoerd.

Als u dat nog niet hebt gedaan, vergeet niet om de Omnipod DASH™ Pod van uw huidige Omnipod DASH™ PDM te deactiveren. Persoonlijke Diabetesmanager schermafbeeldingen dienen alleen educatiedoeleinden en moeten niet worden gezien als suggesties voor instellingen.

► **Mocht u nog vragen hebben over uw Omnipod DASH™ Systeem, neem dan alstublieft contact op met ons 24/7 Klantenserviceteam via 0800 0229512* (Buiten Nederland +31 20 798 9337*).**



INS-ODS-07-2020-00159 V1.0

De schermafbeelding is een voorbeeld dat slechts dient ter illustratie.
*Telefoongesprekken kunnen worden gemonitord en opgenomen voor kwaliteitsbewaking.
Telefoongesprekken met 0800-nummers zijn gratis vanaf lokale vaste lijnen, maar andere netwerken kunnen kosten in rekening brengen.

©2020 Insulet Corporation. Omnipod, het Omnipod-logo, DASH en het DASH-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de V.S. en diverse andere rechtsgebieden. Alle rechten voorbehouden. Schiphol Boulevard 359 D Tower, 111, 1118BJ Schiphol, Nederland.

Insulet