


# Podpals™, fixerende pleister voor actieve dagen

Op zoek naar extra ondersteuning tijdens de warmere maanden, of bij sport- of wateractiviteiten? Bij ons zit u goed. Probeer PodPals™, een fixerende pleister voor de Pod, ontwikkeld door de makers van het Omnipod®-insulinetoedieningssysteem!

**FLEXIBEL DESIGN**

**MEDISCHE KWALITEIT**

**OP MAAT GEMAAKT VOOR DE POD**

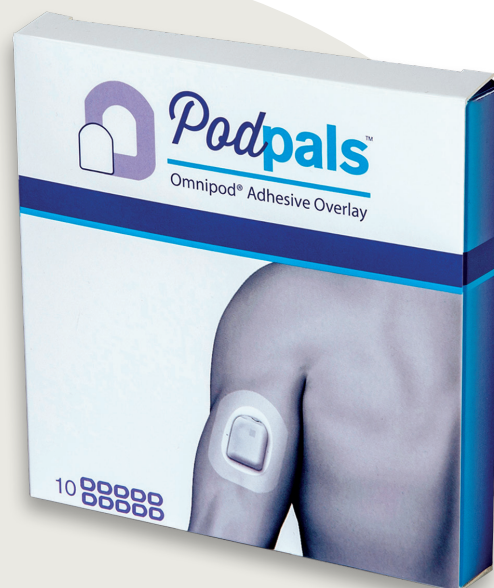


**OM TE BESTELLEN: HOEFT U ALLEEN MAAR NAAR HET INSULET  
KLANTENSERVICETEAM TE BELLEN: 0800 022 9512† OF  
+31 20 798 9337† WANNEER U VANUIT HET BUITENLAND  
BELT. 24 UUR PER DAG EN 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR.**




VEILIGE ONLINE  
BETALING

# PodPals™ - gebruiksaanwijzing


PodPals™ zijn bedoeld als accessoires die kunnen worden gebruikt om bevestiging op de huid rond de Pod te vergemakkelijken bij het gebruik van het Omnipod®-systeem of het Omnipod DASH®-systeem.

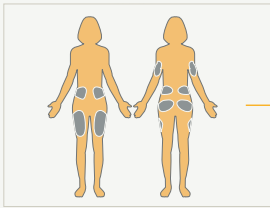


1 > Begin met een actieve Pod op een geschikte locatie.

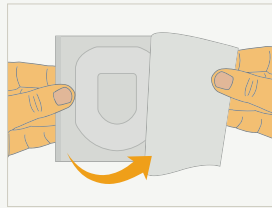


2 > Open de verpakking door de lipjes van elkaar los te trekken.

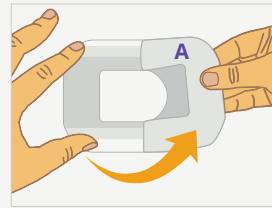


3 > Maak de bovenste laag van de papieren beschermlaag (A) los en verwijder deze volledig.

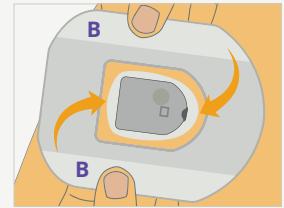


4 > Plaats de PodPal met de klevende kant naar beneden over de Pod. Raak de fixerende laag niet aan. Pak hem, in plaats daarvan, vast aan de papieren beschermfolie (B). Rek de PodPal niet uit voor of tijdens het aanbrengen.

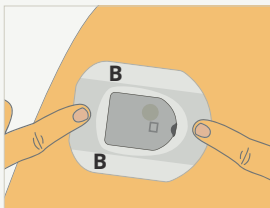

5 > Zorg er, voordat u de PodPal aandrukt, voor dat hij alle randen van de fixerende pleister van de Pod bedekt en geen enkel deel van de Pod zelf, met name het canulekijkvenster.

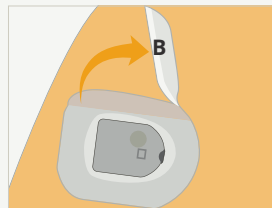

6 > Verwijder voorzichtig de papieren beschermfolie (B) van beide kanten.

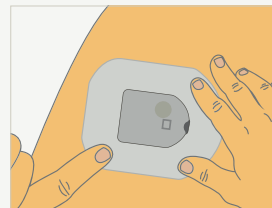

7 > Druk op alle gebieden om de PodPal op de huid en de fixerende pleister van de Pod vast te zetten. Zorg ervoor dat u eventuele oneffenheden goed gladstrijkt.



8 > Wanneer u de PodPal wilt verwijderen, pakt u hem vast aan de randen en trekt u het hulpmiddel voorzichtig los van de huid. Verwijder eerst de PodPal, en daarna de Pod.

## TIPS VOOR HET AANBRENGEN

- > Zorg ervoor dat de plaats waar het product wordt aangebracht schoon en grondig droog is voordat u het aanbrengt. Vermijd het gebruik van bodylotion, crèmes of olie, omdat die producten ervoor kunnen zorgen dat de fixerende pleister loslaat.
- > Druk na het aanbrengen van de PodPal gedurende ong. 30 seconden op het hulpmiddel, om te zorgen voor maximale hechting.

- > Druk op de fixerende pleister en strijk hem zo nodig glad om oneffenheden te voorkomen.
- > Wanneer u uw PodPal aanbrengt op een moeilijk bereikbare plaats aanbrengt, hebt u wellicht hulp nodig.
- > Na het aanbrengen, moet de PodPal gedurende de levensduur van de Pod blijven zitten.

