


# Guida rapida per il Podder™

## Come Erogare Un Bolo



1. > Toccare il pulsante Bolo sulla schermata Home

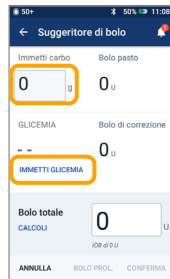


2. > Immettere i grammi di carboidrati (se si desidera mangiare) > Toccare "IMMETTI GLICEMIA"



3. > Immettere manualmente la glicemia > Toccare "AGGIUNGI A SUGGERITORE"



4. > Dopo aver verificato i valori immessi, toccare "CONFERMA"

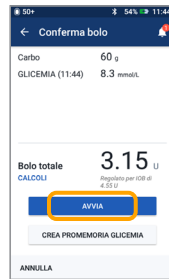

5. > Toccare "AVVIA" per iniziare l'erogazione del bolo

### Promemoria


Mentre si sta erogando un bolo immediato, la schermata Home mostra una barra di avanzamento e alcuni dettagli. Non è possibile usare il PDM Omnipod DASH® durante un bolo immediato.




## Come Impostare Una Basale Temporanea



1. > Toccare l'icona Menu sulla schermata Home

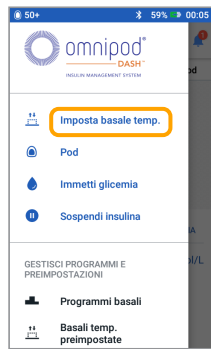

2. > Toccare "Imposta basale temp."

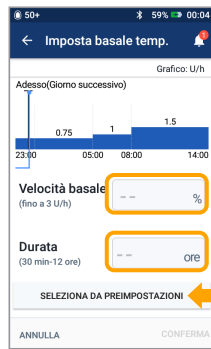


3. > Toccare la casella di immissione Velocità basale e selezionare la % di modifica > Toccare la casella di immissione Durata e selezionare la durata > Oppure toccare "SELEZIONA DA PREIMPOSTAZIONI" (se sono state salvate preimpostazioni)



4. > Dopo aver verificato i valori immessi, toccare "ATTIVA"

### Lo sapevi?


> Se è attiva una velocità basale temporanea, la velocità basale è evidenziata in verde.  
> È possibile passare il dito verso destra su qualsiasi messaggio di conferma verde per disattivarlo più rapidamente.

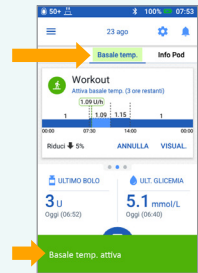


## Sospendere E Riprendere L'erogazione Di Insulina




1. > Toccare l'icona Menu sulla schermata Home

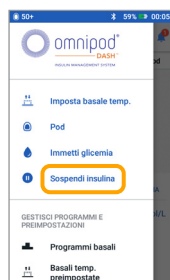

2. > Toccare "Sospendi insulina"

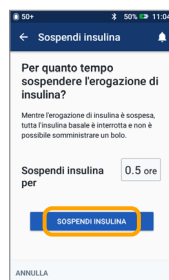

3. > Scorrere fino alla durata di sospensione dell'insulina desiderata > Toccare "SOSPENDI INSULINA" > Toccare "Sì" per confermare che si desidera interrompere l'erogazione di insulina

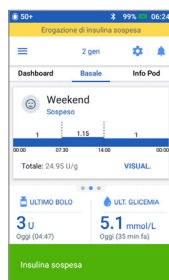

4. > La schermata Home mostra un banner giallo che indica che l'erogazione di insulina è sospesa



5. > Toccare "RIPRENDI INSULINA" per avviare l'erogazione di insulina


### Promemoria

> È INDISPENSABILE riprendere l'erogazione di insulina. L'erogazione di insulina non riprende automaticamente al termine del periodo di sospensione.  
> Il Pod emette un segnale acustico ogni 15 minuti durante l'intero periodo di sospensione per ricordare che l'erogazione di insulina è stata sospesa.  
> Mentre l'erogazione di insulina è sospesa, le velocità basali temporanee o i boli prolungati vengono annullati

# Guida rapida per il Podder™

## Come Sostituire Un Pod

Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale d'uso del sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®

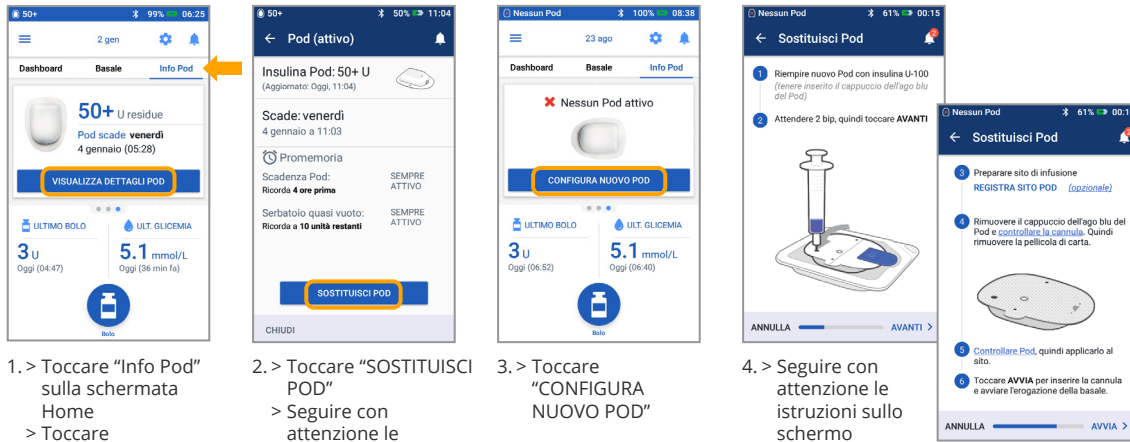


1. > Toccare "Info Pod" sulla schermata Home  
> Toccare "VISUALIZZA DETTAGLI POD"
2. > Toccare "SOSTITUISCI POD"  
> Seguire con attenzione le istruzioni sullo schermo  
> Il Pod verrà disattivato
3. > Toccare "CONFIGURA NUOVO POD"
4. > Seguire con attenzione le istruzioni sullo schermo

### Da non dimenticare!

- > Il Pod va conservato nel vassoio in plastica durante il riempimento e il priming.
- Durante il priming, posizionare il Pod e il PDM Omnipod DASH® uno accanto all'altro e a contatto.

## Come Visualizzare La Cronologia Dell'insulina E Della Glicemia

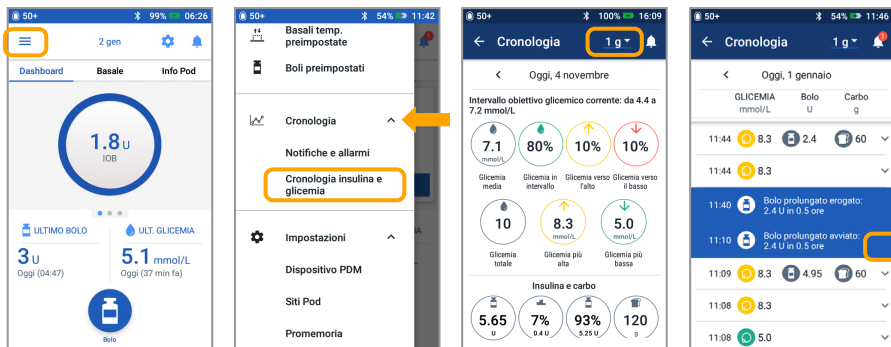

1. > Toccare l'icona Menu sulla schermata Home
2. > Toccare "Cronologia" per espandere l'elenco  
> Toccare "Cronologia insulina e glicemia"
3. > Toccare la freccia a discesa dei giorni per visualizzare 1 o più giorni
4. > Continuare a scorrere verso l'alto per vedere la sezione dei dettagli  
> Toccare la freccia verso il basso per visualizzare altri dettagli

### Tutta la cronologia con un tocco delle dita

- > Informazioni sulla glicemia:
  - glicemia media
  - glicemia in intervallo
  - valori glicemici al di sopra e al di sotto dell'intervallo
  - valori medi per giorno
  - glicemia totale (in quel giorno o intervallo di date)
  - glicemia più alta e più bassa
- > Informazioni sull'insulina:
  - insulina totale
  - insulina totale media (per intervallo di date)
  - insulina basale
  - insulina bolo
  - carbo totali
- > Eventi del PDM o del Pod Omnipod DASH®:
  - bolo prolungato
  - attivazione/riattivazione di un programma basale
  - inizio/fine/annullamento di una basale temporanea
  - attivazione e disattivazione del Pod

### Informazioni importanti sulla sicurezza: il sistema per la gestione insulinica

Omnipod DASH® è destinato alla somministrazione sottocutanea di insulina a velocità impostate e variabili, per la gestione del diabete mellito in pazienti insulina-dipendenti. Il sistema Omnipod DASH® è stato testato e dichiarato sicuro per l'uso con la seguente insulina U-100: Novolog®/NovoRapid®, Humalog®, Fiasp®, Admelog® o Apidra®. Consultare il manuale d'uso del sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® per informazioni complete sulla sicurezza, comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e istruzioni.

Le schermate presentate sul PDM hanno unicamente scopi illustrativi e non devono essere considerate suggerimenti per le impostazioni dell'utente.

Il manuale d'uso del sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® è disponibile online nel sito [www.omnipod.com](http://www.omnipod.com) oppure chiamando il team di assistenza clienti Omnipod® (24 ore su 24/7 giorni su 7), al numero 0800 897618 (Dall'estero +41 44 585 9019). Questa guida rapida per il Podder™ si riferisce al modello di Personal Diabetes Manager PDM-INT2-D001-MM. Il numero di modello del Personal Diabetes Manager è riportato sul coperchio posteriore di ogni PDM.

©2020 Insulet Corporation. Omnipod, il logo Omnipod, DASH, il logo DASH e Podder sono marchi commerciali o marchi registrati di Insulet Corporation negli Stati Uniti e in diverse altre giurisdizioni. Tutti i diritti riservati. Zugerstrasse 74, 6340 Baar. INS-ODS-10-2019-00118 V2

