

Word een Podder™

in drie simpele stappen.

Aan nieuwe gebruikers van het Omnipod®-systeem: voltooi het setupproces met uw zorgverlener of uw gecertificeerde Pod Trainer.



DOOR DE SETUPWIZARD NAVIGEREN

- + Gebruik de knoppen Omhoog/Omlaag op uw Persoonlijke Diabetesmanager (PDM) om een getal te verhogen of verlagen of om naar boven of beneden door een lijst te scrollen.
- + Druk op de schermtoets Volg., Select., Bevest., Opslaan of Klaar om verder te gaan naar het volgende scherm.
- + Druk op de schermtoets Terug of Annuï. om terug te keren naar het vorige scherm.

De functie van elke schermtoets ziet u op het scherm boven elke knop.




De schermen hierboven geven een beknopt voorbeeld van deze functies. De werkelijke schermen kunnen variëren op basis van de gebruikersinstellingen.

VOER UW INSTELLINGEN ZORGVULDIG IN

Het is heel belangrijk dat u uw instellingen nauwkeurig invoert in uw nieuwe PDM*. Volg deze Snelstartgids zorgvuldig. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Omnipod®-systeem als u extra informatie nodig hebt.

Bel de Cliëntenzorg als u vragen hebt over het instellen van uw nieuwe PDM. We zijn dag en nacht en 7 dagen per week bereikbaar via 0800 0229512. Neem contact op met uw zorgverlener als u vragen hebt over de instellingen van uw individuele pomptherapie.

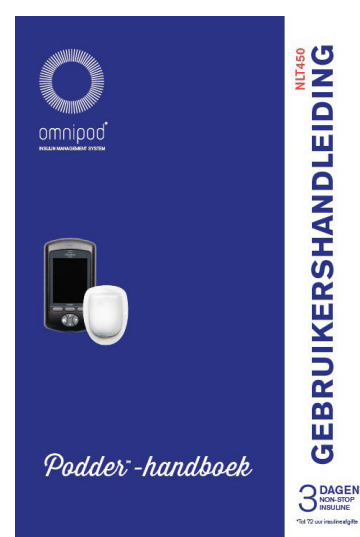

*De PDM is niet waterdicht

1 DE PDM INSTELLEN

Stel de Persoonlijke Diabetesmanager (PDM) in met de setupwizard van het Omnipod®-systeem.

Voor deze stap hebt u een nauwkeurige klok nodig (bijvoorbeeld uw horloge, wekker of mobiele telefoon). U moet ook persoonlijke instellingen invoeren in de nieuwe PDM.

- + Als u al een gebruiker bent van het Omnipod®, haalt u deze instellingen van uw huidige PDM.
- + Bent u een nieuwe gebruiker van het Omnipod®-systeem? Voltooi dan het setupproces met uw zorgverlener of een gecertificeerde Pod Trainer.

- 1 Plaats de AAA-batterijen die bij de PDM zijn geleverd in het batterijkvak aan de achterkant van de PDM.



- 2 De setupwizard wordt de eerste keer dat u uw PDM inschakelt, geopend.

De wizard begeleidt u door het setupproces. Volg de aanwijzingen op elk scherm om het volgende in te stellen:

- + Uw ID-naam: dit is de naam om u aan te melden op uw PDM
- + De kleur van uw ID-scherm: u kunt kiezen uit wit, groen, blauw, oranje of paars
- + Huidige tijd en datum
- + Maximale basale afgifte
- + Initiële basale afgifte en/of basaalprogramma
- + Tijdelijke basale methode
- + Geluidinstelling bloedglucose (BG) en BG-doel
- + Voorgestelde bolusberekeningen en geassocieerde doelwaarden, verhoudingen en factoren (indien van toepassing)
- + Verhogingsstap voor bolus
- + Maximale bolus
- + Verlengde bolusmethode
- + Volumesignaal Reservoir bijna leeg
- + Kennisgeving over uiterste gebruiksdatum van Pod



2

EEN NIEUWE POD ACTIVEREN

Zodra de PDM is ingesteld, zal het apparaat u vragen of u een Pod wilt activeren. Volg de instructies op de PDM om een nieuwe Pod te activeren.

- Zorg dat u beschikt over de volgende benodigdheden:
+ PDM + Ongeopende Pod + Alcoholhoudend doekje
+ Injectieflacon van snelwerkende E100-insuline op kamertemperatuur



- Was uw handen met water en zeep. Maak de bovenkant van de injectieflacon met insuline schoon met het alcoholhoudende doekje.

- Verwijder de vulnaald en spuit uit de Pod-verpakking. Draai de vulnaald rechtsom op de bovenkant van de spuit. Gebruik geen ander type naald of vulsysteem dan de spuit die bij elke Pod wordt meegeleverd.



- Verwijder de beschermdop van de naald. Trek lucht op in de spuit gelijk aan de hoeveelheid insuline die u gebruikt. U moet uw spuit vullen met minstens 85 eenheden insuline. Steek de naald in de flacon en injecteer lucht.



- Draai de injectieflacon op zijn kop en trek er traag insuline uit op. Tik tegen de gevulde spuit om eventuele luchtbellen te verwijderen.



- Verwijder de naald uit de injectieflacon en steek deze in de vulpoort voor insuline op de Pod. Een pijl op de witte papieren beschermlaag wijst de vulpoort aan. Spuit geen insuline ergens anders in de Pod in. Laat de Pod in het bakje terwijl u deze vult met insuline.

! Om te zorgen dat de Pod correct is gevuld, steekt u de vulspuit niet in een hoek in de vulpoort.

- Spuit insuline in de vulpoort. De Pod zal twee keer piepen. Verwijder de naald uit de vulpoort voor insuline. Plaats de beschermdop terug op de naald en verwijder de naald van de vulspuit.



! NOOIT lucht in de vulpoort spuiten. Dit kan resulteren in onbedoelde of onderbroken insulineafgifte.

! NOOIT een Pod gebruiken als u weerstand voelt bij het indrukken van de plunjer op de vulspuit. Dit kan resulteren in onderbroken insulineafgifte.

- Plaats de Pod in het bakje rechts van en met aanraking van de PDM om te zorgen dat de apparaten kunnen communiceren. Druk op Volgende op de PDM. Het Omnipod[®]-systeem voert een reeks veiligheidscontroles uit en de Pod wordt automatisch voorgevuld.



3

INSULINEAFGIFTE STARTEN

Volg de instructies op de PDM om de insulineafgifte te starten.

- Raadpleeg de brochure over Podplaatsing of de gebruikershandleiding van het Omnipod[®]-systeem om u te helpen beslissen waar u uw Pod kunt plaatsen. Was uw handen met water en zeep. Gebruik een alcoholhoudend doekje om het toepassingsgebied schoon te maken. Laat grondig luchtdrogen. Niet blazen om het toepassingsgebied droog te maken.



- Verwijder de transparante naalddop op de onderkant van de Pod wanneer de PDM u dat vraagt. Trek stevig naar boven op de buitenste rand.



- Verwijder de witte papieren beschermlaag van de kleeftape. Als de Pod nat of vuil is of de beschermlaag van de pleister gevouwen is, drukt u op Weggooien op de PDM en begint u opnieuw met een nieuwe Pod.



- Breng de Pod aan op de gekozen locatie na verificatie dat de Pod in orde is. Gebruik uw vinger om de kleeftape te verzegelen. Druk op Volgende op de PDM.



- Druk op Start op de PDM. De naald wordt ingebracht om een canule onder de huid te plaatsen. U hoort een klik en voelt een kleine prik.



- Kijk door het kijkvenster van de Pod om de canule te controleren. Controleer de infusieplaats om te verzekeren dat de canule correct werd ingebracht.

- Controleer het oppervlak van de Pod: u ziet nu het roze schuifje in het venster op het bovenste oppervlak. Druk op Nee op de PDM als de canule niet correct is ingebracht. Druk op Weggooien om de Pod te deactiveren en het proces opnieuw te beginnen met een nieuwe Pod. Druk op Ja op de PDM als de canule correct is ingebracht.



- Controleer uw BG 1,5 uur nadat u een Pod hebt geactiveerd. De PDM geeft hiervoor een herinnering weer. U krijgt ook een herinnering om de infusieplaats te controleren om te verzekeren dat de canule correct is ingebracht. Druk op OK op de PDM nadat u deze controles hebt voltooid.

! Alvorens verder te gaan met het Insulinetoedieningssysteem van het Omnipod[®]-systeem, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor uitgebreide gebruiksinstructies.




19141-5J-AW Rev A 12/17

© 2017 Insulet Corporation. Omnipod, Podder en het Omnipod-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en verschillende andere rechtsgebieden. Alle rechten voorbehouden.

Informatie over het patent in de VS: www.insulet.com/patents

FreeStyle en gerelateerde merken zijn handelsmerken van Abbott Diabetes Care, Inc. in verschillende rechtsgebieden en worden gebruikt met toestemming.

Foto's van echte gebruikers van het Omnipod[®]-systeem.

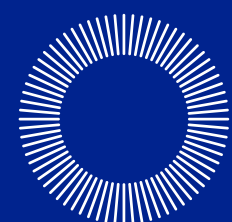

omnipod[®]
INSULIN MANAGEMENT SYSTEM



SNELSTARTGIDS

Insulinetoedieningssysteem