

Toma el control. Mantente informado.

Con un simple vistazo, podrás llevar un registro de las tendencias en el cuidado de tu diabetes y compartir los datos que aparecen en tu sistema Omnipod DASH[®] con otros miembros de tu equipo de atención.

Cargas automáticas.

Esta opción se incluye en el sistema Omnipod DASH[®].



Conecta el PDM al Wi-Fi

Los datos se cargan automáticamente

Los proveedores de atención médica pueden ver e interpretar los datos desde cualquier lugar

Nombre del usuario (correo electrónico)

Contraseña

Código ProConnect

TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE: si tu médico ha cargado tu PDM Omnipod[®] actual a Glooko en el pasado, ya tienes una cuenta de Glooko. Si no puedes recordar tus credenciales de inicio de sesión, llama al servicio técnico de Glooko al **1-800-206-6601**. Nuestros representantes te las proporcionarán y se asegurarán de que tu cuenta esté conectada con la de tu médico.

Crea tu cuenta de Glooko:

- 1 Visita la página **my.glooko.com**
- 2 Inicia una sesión o haz clic en **Sign Up for Glooko Here** (Regístrate con Glooko aquí) y completa tu información
 - Ingresa un código ProConnect para compartir automáticamente tus datos del sistema Omnipod DASH[®] con tu médico
- 3 Selecciona **I am an Omnipod[®] System user (Soy un usuario del sistema Omnipod[®])**



Activa la carga automática:

- 1 Desplázate hasta la configuración y selecciona **Connect to DASH[®] Cloud (Conectarse a la nube de DASH[®])**
- 2 Inicia sesión en **PodderCentral[®]**
- 3 Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla

¡Y ya está!



NO OLVIDES...

- Agrega el código ProConnect para que tu médico pueda ver tus datos.
- Asegúrate de que el Wi-Fi en el PDM esté prendido.

Si tienes problemas con Glooko, comunícate con el servicio de técnico de Glooko:

Llamadas: 1-800-206-6601 **Mensajes de texto:** 650-720-5310
Correo electrónico: support@glooko.com

Para más información sobre el sistema Omnipod DASH[®], comunícate con el equipo de atención al cliente de

Insulet: llamadas: 1-800-591-3455 **Visita:** omnipod.com