

# OmniPod®

Insulin Management System



## Guía rápida de uso

13156-AW Rev B © 2008 Insulet Corporation

## Sistema de administración de insulina OmniPod

### Controlador personal de diabetes (Personal Diabetes Manager, PDM)





### OmniPod



## Cómo navegar por el Setup Wizard (Asistente de Configuración)

1. Utilice el **control hacia arriba y hacia abajo** para incrementar o reducir un valor numérico o para subir o bajar por una lista.
2. Oprima la tecla **Next (Siguiete)**, **Select (Seleccionar)**, **Save (Guardar)**, o **Done (Terminado)** para pasar a la pantalla siguiente.
3. Oprima la tecla **Back (Atrás)** o **Cancel (Cancelar)** para regresar a la pantalla anterior.

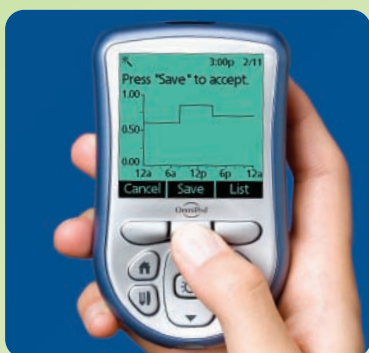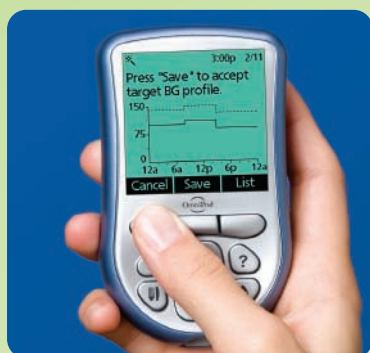


La función de cada una de las teclas aparece en la pantalla, encima de cada botón. Estas pantallas muestran algunos ejemplos de estas funciones.



## Configure

### su Controlador personal de diabetes (PDM) con el OmniPod Setup Wizard (Asistente de Configuración)\*

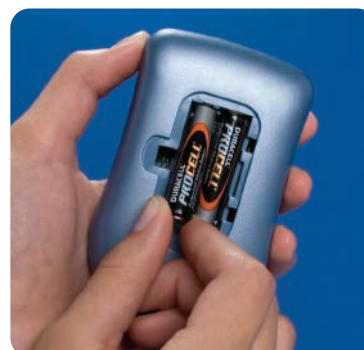

1. Inserte las baterías AAA que se incluyen con su PDM. Los símbolos ubicados en el compartimiento de las baterías indican la dirección en que deben insertarse.



2. Junto con su proveedor médico, el Setup Wizard (Asistente de Configuración) lo guiará a través del proceso de configuración. Siga las indicaciones de la pantalla para configurar lo siguiente:

- Fecha y hora
- Flujo basal máximo
- Programa y/o flujo basal inicial
- Flujo basal temporario
- Configuración del sonido que se emite al mostrar el valor de glucosa en la pantalla, y valor deseado de glucosa en sangre
- Cálculo del bolo sugerido y los objetivos, índices y factores asociados (si corresponde)
- Incremento del bolo
- Bolo máximo
- Bolo extendido
- Alerta de volumen bajo en el depósito

## Información de contacto

Insulet Corporation

Asistencia al cliente: 800.591.3455 (24 horas al día/7 días por semana)

Fuera de los Estados Unidos llame al: +1.781.457.5098

Sitio Web: MyOmniPod.com

\* Estos pasos deben realizarse bajo la supervisión de su proveedor de servicios médicos.

Continúa al dorso



# 2

## Active un OmniPod nuevo

Una vez configurado, el PDM le preguntará si desea activar un Pod. Siga las instrucciones del PDM para activar un OmniPod nuevo.



1. Reúna los siguientes elementos: Un frasco de insulina a temperatura ambiente (U-100, de acción rápida), un OmniPod sellado, el PDM y un pañito de alcohol (A).
2. Lávese las manos.
3. Saque el OmniPod del paquete estéril.
4. Limpie la parte superior del frasco de insulina con el pañito de alcohol.

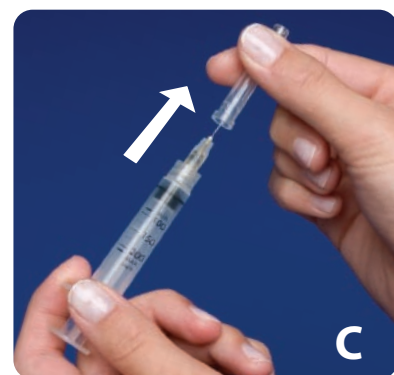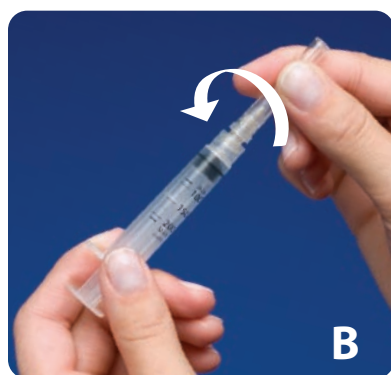

5. Arme la jeringa de llenado enroscando la aguja en la jeringa (B) y luego quite la tapa protectora (C).



**AVISO** No use ningún otro tipo de aguja o dispositivo de llenado aparte de la jeringa que viene con cada Pod.

6. Introduzca en la jeringa una cantidad de aire igual a la dosis de insulina necesaria para 72 horas y a continuación inyecte el aire en el frasco de insulina.
7. Extraiga la insulina del frasco, llenando la jeringa con una cantidad suficiente para 72 horas, o hasta llegar al menos a la línea indicada como MIN (mínimo) (D). Elimine todas las burbujas de aire de la jeringa.



8. Inserte la aguja verticalmente en el orificio de llenado que se encuentra en la cara posterior del OmniPod (E).

**AVISO** Para asegurar un llenado correcto, no inserte la jeringa en ángulo en el orificio de llenado.

9. Vacíe todo el contenido de la jeringa en el OmniPod. El Pod emitirá un pitido para indicar que el sistema está listo para el siguiente paso.



**ADVERTENCIA** NUNCA utilice un Pod si cuando lo llena detecta algún crujido o resistencia al empujar el émbolo de la jeringa de llenado. El uso del Pod en estas condiciones puede causar una infusión insuficiente de la insulina.

10. Una vez que llene el Pod, oprima **Next** (F) para iniciar el cebado. Cuando el Pod complete correctamente el cebado y los controles de seguridad, el PDM emitirá un pitido.

# 3

## Comience la administración de insulina


Siga las instrucciones del PDM para comenzar a administrar la insulina.




1. Seleccione y prepare la zona de infusión (A) desinfectándola con un pañito de alcohol. Déjela secar al aire completamente. No trate de secarla soplando sobre la zona.



2. Quite la tapa de la aguja (B) y luego retire y deseche el papel blanco que cubre el forro adhesivo (C).

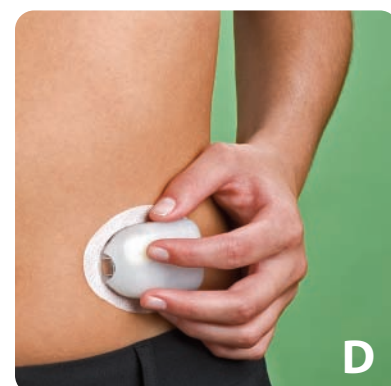

3. Aplique el OmniPod en la zona de infusión seleccionada. A continuación, deslice un dedo sobre el contorno adhesivo para fijarlo firmemente y oprima **Next** (D).

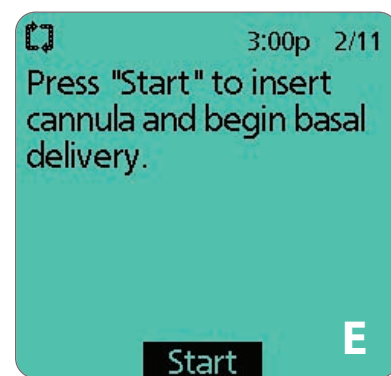

4. Para insertar la cánula, oprima **Start** (E). El OmniPod inserta automáticamente la cánula y administra un bolo de cebado para llenar la cánula con insulina. El proceso de inserción se realiza en unos pocos segundos.

5. Una vez insertada la cánula, el PDM indica que el Pod está activo y administrando la insulina al flujo basal programado.

6. Oprima **OK** para ver la pantalla de estado.



**ADVERTENCIA** NUNCA inyecte aire en el orificio de llenado. Esto podría provocar la administración imprevista o interrumpida de la insulina.



**ADVERTENCIA** NUNCA inyecte insulina (o ninguna otra sustancia) en el orificio de llenado mientras el Pod esté sobre su cuerpo. Esto podría provocar la administración imprevista o interrumpida de insulina.



*Antes de continuar con el Sistema OmniPod, consulte la Guía del usuario para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas.*