


Korte Handleiding Voor De Omnipod® Gebruiker


Een Bolus Toedienen

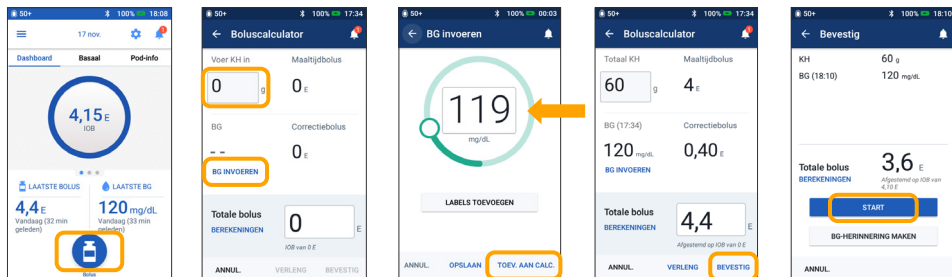


1. > Tik op het pictogram Bolus op het startscherm
2. > Voer het aantal gram koolhydraten in (als u gaat eten) > Tik op "BG INVOEREN"
3. > Voer uw BG (bloedglucose) handmatig in > Tik op "TOEV. AAN CALC."
4. > Tik op "BEVESTIG" als u hebt gecontroleerd dat uw ingevoerde waarden correct zijn
5. > Tik op "START" om de bolustoediening te starten

Herinnering

Als u een onmiddellijke bolus geeft, zijn op het startscherm de gegevens en een voortgangsbalk te zien. U kunt uw Omnipod DASH®-PDM niet gebruiken tijdens een onmiddellijke bolus.

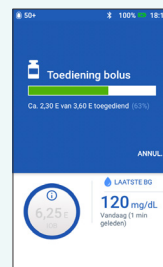


Een Tijdelijke Basaalsnelheid Instellen

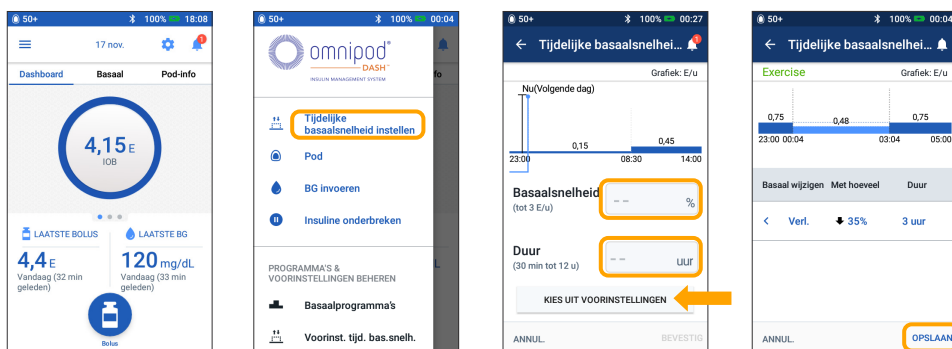


1. > Tik op het startscherm op het pictogram Menu
2. > Tik op "Tijdelijke basaalsnelheid instellen"
3. > Tik op het invoervak voor Basaalsnelheid en kies de gewenste wijziging (in %) > Tik op het invoervak voor Duur en kies de gewenste tijdsduur > Of tik op "KIES UIT VOORINSTELLINGEN" (als u voorinstellingen hebt opgeslagen)
4. > Tik op "ACTIVEREN" als u hebt gecontroleerd dat uw ingevoerde waarden correct zijn

Wist u dit?

- > Tijdelijke basaalsnelheid is groen gemarkeerd als er een actieve tijdelijke basaalsnelheid loopt.
- > U kunt een groen bevestigingsbericht altijd naar rechts vegen om het snel te laten verdwijnen.

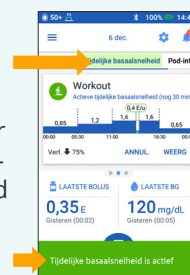

Onderbreken En Hervatten Van Insulinetoediening

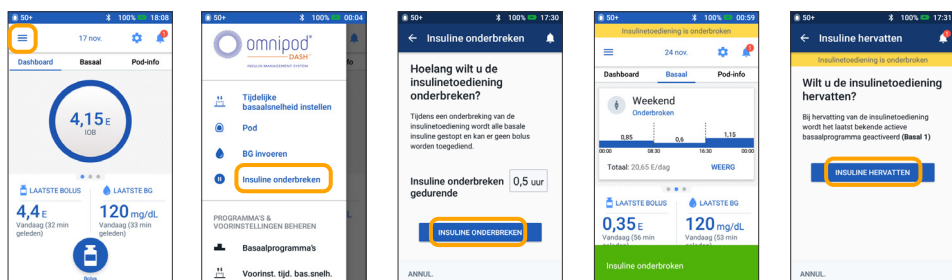

1. > Tik op het startscherm op het pictogram Menu
2. > Tik op "Insuline onderbreken"
3. > Scroll naar de gewenste duur van insulineonderbreking > Tik op "INSULINE ONDERBREKEN" > Tik op "Ja" om de insulinetoediening te stoppen
4. > Het startscherm toont in een gele balk de mededeling dat de insulinetoediening is onderbroken
5. > Tik op "INSULINE HERVATTEN" om de insulinetoediening weer te starten


Herinnering

- > U MOET de insulinetoediening hervatten. Dit gebeurt na een onderbreking niet automatisch.
- > Gedurende de onderbrekingsperiode piept de Pod elke 15 minuten om u eraan te herinneren dat er geen insuline wordt toegediend.
- > Verlengde bolussen en tijdelijke basaalsnelheden worden geannuleerd als u de insulinetoediening onderbreekt.

Korte Handleiding Voor De Omnipod® Gebruiker

Een Pod Vervangen

Zie de handleiding van het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem voor uitgebreide instructies

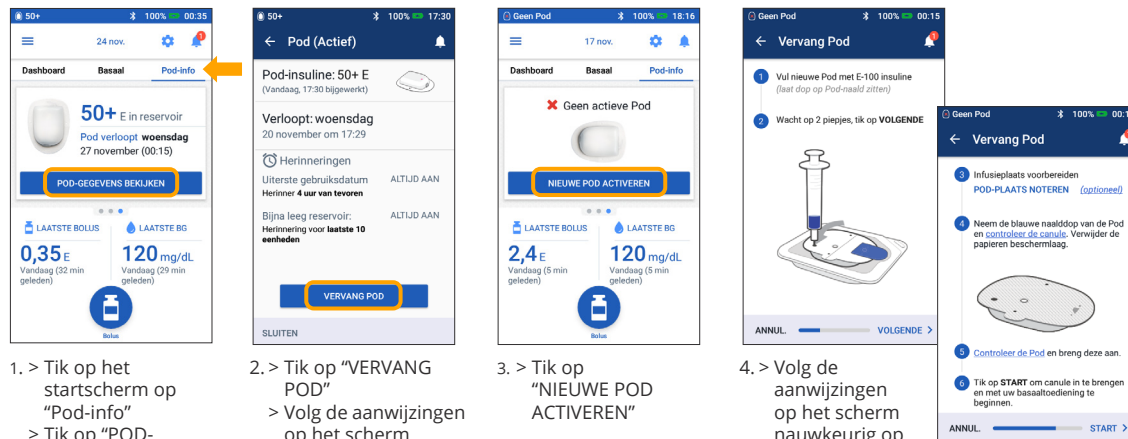


1. > Tik op het startscherm op "Pod-info"
> Tik op "POD-GEGEVENS BEKIJKEN"
2. > Tik op "VERVANG POD"
> Volg de aanwijzingen op het scherm nauwkeurig op
> Pod wordt uitgeschakeld
3. > Tik op "NIEUWE POD ACTIVEREN"
4. > Volg de aanwijzingen op het scherm nauwkeurig op

Denk hieraan!

- > Laat de Pod in het plastic bakje zitten tijdens het vullen en klaarmaken.
- > Plaats de Pod en Omnipod DASH®-PDM tegen elkaar aan tijdens het voorvullen.

Geschiedenis Insulinetoediening En Bloedglucosewaarden Bekijken

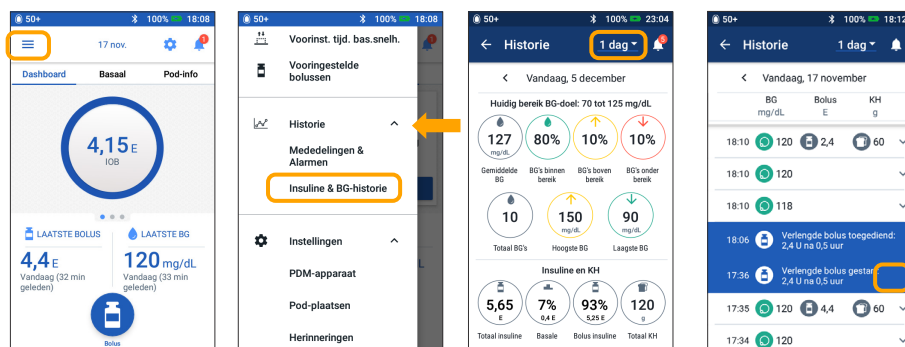

1. > Tik op het startscherm op het pictogram Menu
2. > Tik op "Historie" om de lijst te openen
> Tik op "Insuline & BG-historie"
3. > Tik op de pijl omlaag om de geschiedenis van 1 dag of meerdere dagen weer te geven
4. > Veeg verder naar boven om het scherm met gegevens te bekijken
> Tik op de pijl omlaag om meer gegevens te tonen

Uw geschiedenis eenvoudig bij de hand!

- > Informatie BG:
 - Gemiddelde BG
 - BG's binnen bereik
 - BG's boven en onder bereik
 - Gemiddeld aantal metingen per dag
 - Totaal BG's (op die dag of in die periode)
 - Hoogste en laagste BG
- > Informatie insulinetoediening:
 - Totaal insuline
 - Gem. totale hoev. insuline (in die periode)
 - Gemiddelde basaalinsuline
 - Gem. Bolusinsuline
 - Gem. Totaal KH
- > Gebeurtenissen Omnipod DASH®-PDM of -Pod:
 - Verlengde bolus
 - Activering/heractivering van een basaalprogramma
 - Start/stop/annulering van een tijdelijke basaalnelheid
 - Pod geactiveerd of gedeactiveerd

Belangrijke veiligheidsinformatie: Het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem is bestemd voor het met vaste en variabele snelheden subcutaan toedienen van insuline voor de behandeling van diabetes mellitus bij mensen die insuline nodig hebben. Het Omnipod DASH®-systeem is getest en veilig bevonden voor gebruik met de volgende soorten U-100-insuline: Novolog®/NovoRapid®, Humalog®, Fiasp®, Admelog® of Apidra®. Zie de gebruikershandleiding voor het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem voor de volledige veiligheidsinformatie, waaronder indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, aandachtspunten en instructies.

De afbeeldingen van de Persoonlijke Diabetesmanager zijn puur illustratief bedoeld en niet als aanbevelingen voor gebruikersinstellingen.

De gebruikershandleiding voor het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem is online verkrijgbaar op: www.omnipod.com, of bel de klantenservice van Omnipod® (24 uur per dag, 7 dagen per week) op: 0800 17682 (Buiten België +32 2896 2983). Deze korte handleiding voor de Omnipod® Gebruiker geldt voor de Persoonlijke Diabetesmanager van het type PDM-INT1-D001-MG. Het PDM-typenummer staat afgedrukt op de achterzijde van elke Persoonlijke Diabetesmanager.

©2020 Insulet Corporation. Omnipod, het Omnipod-logo, DASH en het DASH-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de VS en diverse andere rechtsgebieden. Alle rechten voorbehouden. 1 King Street, 5th Floor, Hammersmith, London W6 9HR. INS-ODS-03-2020-001723

