


PodPals™: supporto adesivo per le giornate attive

Hai bisogno di un aiuto in più durante i mesi più caldi, lo sport o le attività acquatiche? Detto, fatto. Prova l'accessorio PodPals™, un supporto adesivo per il Pod sviluppato dai produttori del sistema per la gestione insulinica Omnipod®!

**DESIGN FLESSIBILE
DI GRADO MEDICO
SU MISURA PER IL POD**

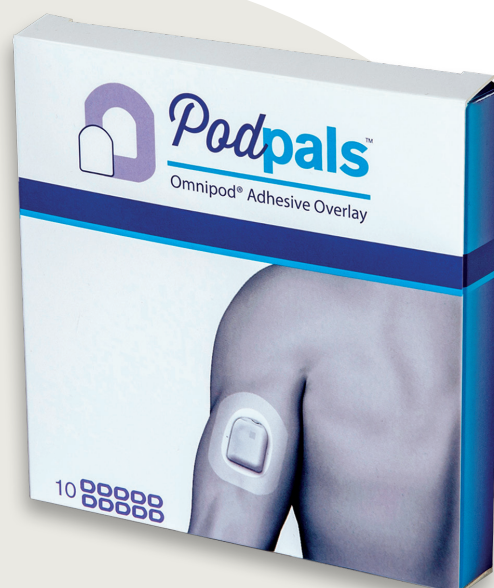


**PER EFFETTUARE L'ORDINE, CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI
INSULET AL NUMERO 0800 89 76 18† O +41 44 585 9019†
SE SI CHIAMA DA UN ALTRO PAESE.
SERVIZIO DISPONIBILE 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7.**

† Le telefonate possono essere monitorate e registrate per motivi di valutazione della qualità.
Le chiamate ai numeri 0800 sono gratuite dai telefoni fissi locali, ma altre reti possono effettuare addebiti.




Istruzioni per l'uso di PodPals™


I PodPals™ sono intesi come accessori utilizzabili per favorire l'aderenza del Pod alla pelle durante l'utilizzo del sistema Omnipod® o del sistema Omnipod DASH®.

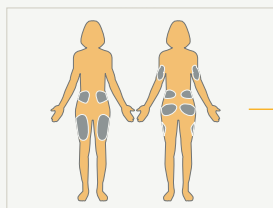


1 > Iniziare con un Pod attivo applicato su un sito appropriato.

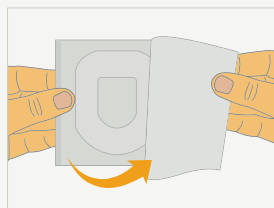


2 > Aprire la confezione tirando le linguette.

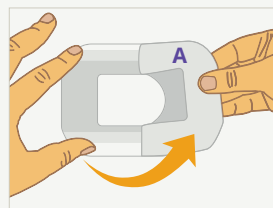


3 > Staccare e rimuovere completamente lo strato superiore della pellicola di carta (A).

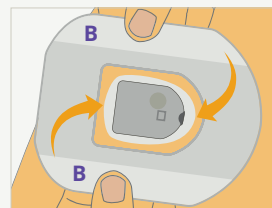


4 > Con il lato adesivo rivolto verso il basso, posizionare il PodPal sul Pod, evitando di toccare l'adesivo. Tenerlo invece tramite le pellicole di carta (B). Non tirare il PodPal prima o durante l'applicazione.

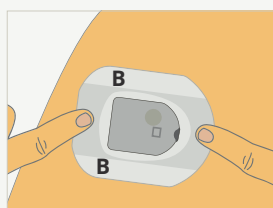

5 > Prima di premere sul PodPal per farlo aderire alla pelle, accertarsi che copra tutto il bordo del cerotto adesivo del Pod e che non copra nessuna parte del Pod, soprattutto la finestrella di visualizzazione della cannula.

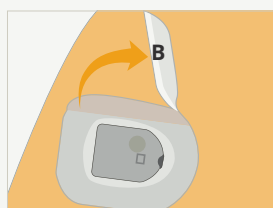

6 > Staccare delicatamente le pellicole di carta (B) da entrambi i lati.

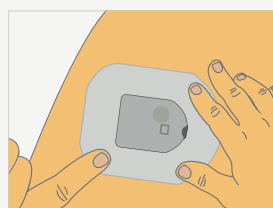

7 > Esercitare pressione su tutte le aree per far aderire il PodPal alla pelle e al cerotto adesivo del Pod. Accertarsi di distendere eventuali pieghe.



8 > Quando si è pronti per rimuovere il PodPal, staccarlo delicatamente a partire dai bordi e sollevarlo dalla pelle. Rimuovere prima il PodPal e poi il Pod.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

- > Accertarsi che il sito di applicazione sia pulito e completamente asciutto prima dell'applicazione. Evitare di usare lozioni, creme o oli, in quanto tali prodotti potrebbero causare il distacco dell'adesivo.
- > Premere il PodPal per 30 secondi dopo l'applicazione per garantire la massima adesione.

- > Se necessario, premere e distendere il supporto per evitare la formazione di pieghe.
- > Quando si applica il PodPal in una posizione difficile da raggiungere, potrebbe essere necessaria assistenza.
- > Una volta applicato, il PodPal deve rimanere in posizione per tutta la vita utile del Pod.

