



Omnipod® 5 en Glooko® Belangrijke informatie

EEN OMNIPOD® 5-BROCHURE VOOR
MENSEN MET DIABETES

omnipod[®]
5
automated insulin
delivery system

KOPPEL de gegevens van uw Omnipod 5: Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem met Glooko



Als u het koppelen van uw Omnipod 5 en Glooko hebt gemist, volgt u deze vier eenvoudige stappen:

1. Log in bij uw online Omnipod-account op www.omnipod.com met uw Omnipod-ID
2. Ga naar het tabblad **Mijn account** en selecteer Koppeling van een account in het vervolgkeuzemenu. Klik vervolgens op "**Account koppelen**"
3. Selecteer "**Aanmelden**" of "**Inloggen**" met Glooko
4. Ga verder naar Glooko en voltooi het koppelingsproces voor uw account

Wanneer dit voltooid is, wordt uw status bijgewerkt naar "**Gekoppeld**" en worden gegevens automatisch geüpload naar uw persoonlijke Glooko-account*. U kunt uw accountkoppeling tussen Omnipod en Glooko op elk moment stopzetten om het delen van gegevens te stoppen.

OPMERKING: Alle schermafbeeldingen zijn voorbeelden, alleen voor instructieve doeleinden.

*Moet zijn verbonden met wifi of mobiele gegevens en Omnipod 5-gebruikers moeten toegang tot wifi of mobiele gegevens hebben om updates in Glooko te ontvangen.

Kies voor het **DELEN** van de gegevens van uw Omnipod 5: Geautomiseerd Insulinetoedieningssysteem met uw zorgverlener



Het invoeren van een ProConnect-code in Glooko is de enige manier voor uw zorgverlener om uw Omnipod 5-gegevens op zijn/haar computer te zien.

ProConnect-code:
gegeven door
uw zorgverlener


Als u het koppelen van uw Glooko-account met uw zorgprofessional hebt gemist, volgt u deze vijf eenvoudige stappen:

1. Log in bij uw Glooko-account op my.glooko.com
2. Selecteer "**Instellingen**" in het vervolgkeuzemenu (rechtsboven in het beginscherm)
3. Scroll omlaag naar Account en selecteer "+ **Nieuwe code toevoegen**"
4. Selecteer "**Doorgaan**"
5. Voer de ProConnect-code (hieronder vermeld) in en selecteer "**Verzenden**"

OPMERKING: Alle schermafbeeldingen zijn voorbeelden, alleen voor instructieve doeleinden.

De GLOOKO-APP VOOR MOBIELE APPARATEN gebruiken

U kunt kiezen tussen het gebruik van de Glooko-app voor mobiele apparaten of het online Glooko-platform my.glooko.com

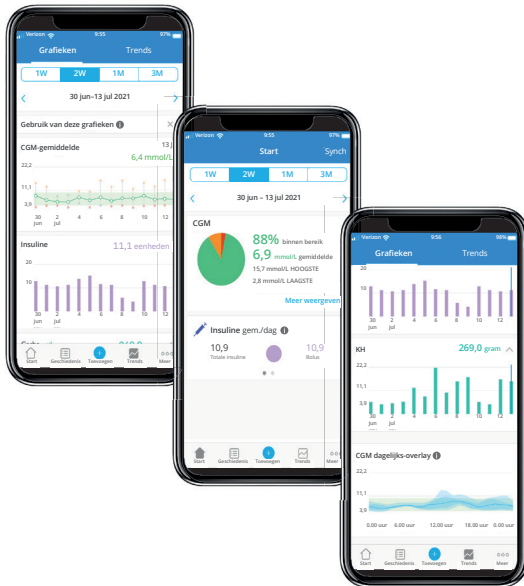

OPMERKING: Alle schermafbeeldingen zijn voorbeelden, alleen voor instructieve doeleinden.

Voor iOS 

Download de App en log in

- Zoek in de App Store de "Glooko mobiele App" en installeer deze
- Log in of maak een account aan door de gevraagde gegevens in te vullen


Bekijk uw gegevens

Zodra uw gegevens zijn geüpload naar Glooko, kunt u uw trends en grafieken bekijken op uw iPhone of iPad

Bekijk uw gegevens

- Klik op het tabblad **Meer**,
- Klik op **Rapporten delen** om de rapporten te kunnen versturen.

Voor Android

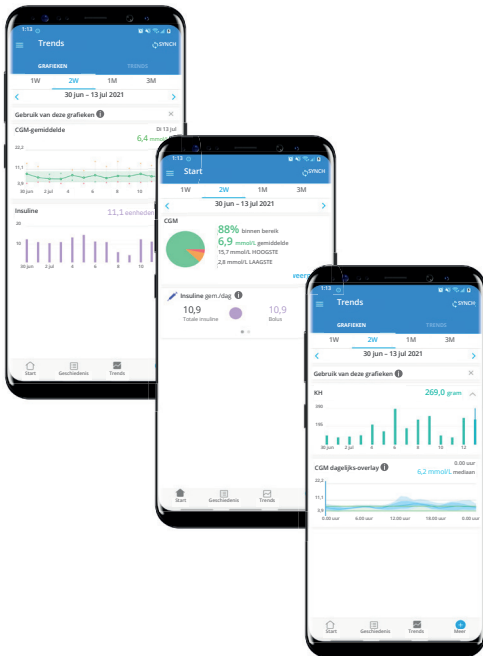

Download de App en log in

- Zoek in de Google Play™ Store de "Glooko mobiele App" en installeer deze
- Log in of maak een account aan door de gevraagde gegevens in te vullen

Synchroniseer en bekijk uw gegevens

- Tik in het beginscherm op Synchroniseren en selecteer Omnipod 5: Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem
- Volg de aanwijzingen om het synchroniseren te voltooien

Kies om gegevens te delen met uw zorgverlener

Klik op **Rapporten delen** om de rapporten te kunnen versturen.

OPMERKING: Alle schermafbeeldingen zijn voorbeelden, alleen voor instructieve doeleinden.

Een PDF-RAPPORT maken, opslaan of afdrukken

U kunt rapporten maken en bekijken op de **Glooko-app voor mobiele Apparaten** of op **my.glooko.com**.

1. Log in bij uw account

2. Een rapport maken:

- Klik op uw **profiel**
- Klik op **PDF-rapport maken** (rechtsboven)
- Kies de gewenste rapporten en tijdsperiode en klik op **PDF maken**

3. Een rapport opslaan/afdrukken:

Sla het rapport na het maken op uw bureaublad of de gewenste locatie op, of druk het direct af.

The screenshot shows the 'PDF maken' (Create PDF) interface in the Glooko app. At the top, it displays the user's name 'Liv Waddle', birth date '17/08/2009', and diabetes type 'type 1'. There are options for 'Voorkeurs-PDF-instelling' (Preferred PDF setting) and 'Favorieten beheren' (Manage favorites). The main area features a grid of report thumbnails: 'Samenvatting' (2 pages), 'Logboek' (2 pages), 'Overzicht' (1 page), 'Dagoverzicht' (14 pages), 'Weekoverzicht' (1 page), 'Overlay' (1 page), 'Kalender' (2 pages), 'Inzichten' (1 page), and 'Apparaten' (14 pages). A 'Tijd' (Time) selector is set to '2 weken' (2 weeks) for the period '10/11/2021-23/11/2021'. At the bottom, there are options for 'Geschatte rapportlengte: 20' (Estimated report length: 20), 'Afdrukmodus' (Print mode) with 'Zwart-wit' (Black and white) and 'Kleur' (Color) options, a note about saving comments, and a 'PDF maken' button.

OPMERKING: Alle schermafbeeldingen zijn voorbeelden, alleen voor instructieve doeleinden.

TIP! Sla aangepaste rapportsets op:


- Klik op **Instellingen**
- Scroll omlaag en klik op **Nieuwe favoriet**
- Selecteer de gewenste rapporten en geef de rapportset een naam (*bijv. Dr. Smith-rapporten*)



Goede rapporten om mee te beginnen zijn:


Samenvattende rapporten, dagoverzicht, weekoverzicht

Momentopname van **belangrijke statistieken** en **samen gevoegde informatie** voor het vaststellen van positieve punten en uitdagingen ter ondersteuning van uw zorg

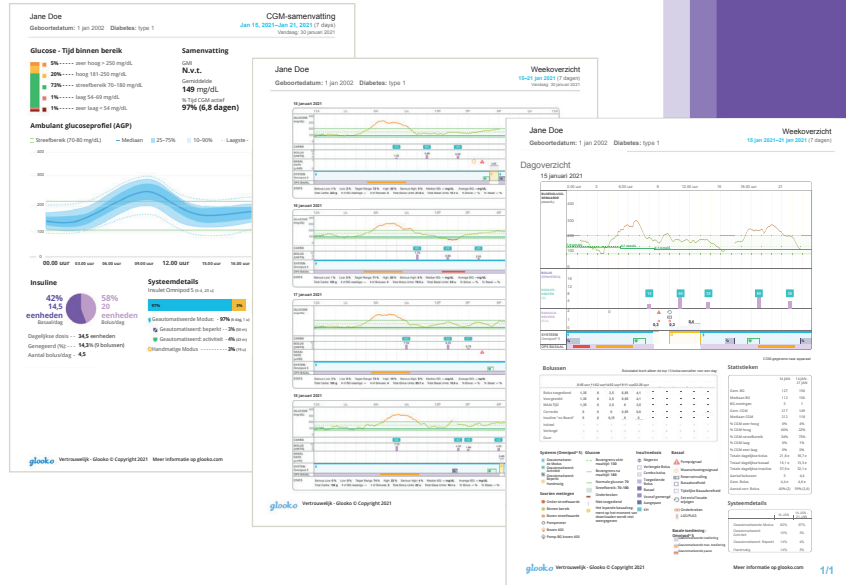

Het apparaatinstellingenrapport

Als u uw gegevens naar Glooko van Insulet uploadt, worden uw pompinstellingen opgeslagen. Dit rapport is een geweldige bron voor u en uw zorgteam om naar te verwijzen.

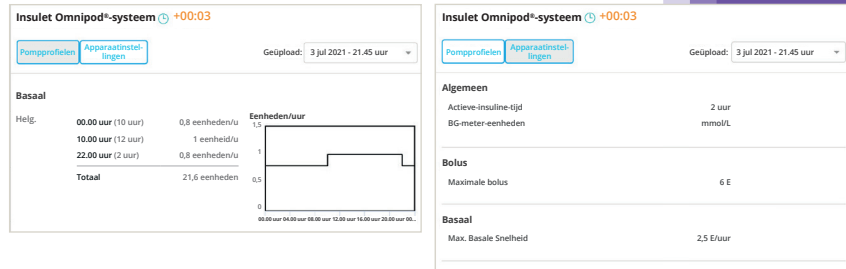

OPMERKING: Alle schermafbeeldingen zijn voorbeelden, alleen voor instructieve doeleinden.



Neem als u vragen of opmerkingen heeft over Omnipod 5 contact op met het Omnipod-team via:

0800 0229512*

of +31 20 798 9337 indien u belt vanuit het buitenland.

Neem contact op met de Glooko-ondersteuning als u problemen ervaart met Glooko:

0800 0235 145*

www.glooko.com
help@glooko.com



*Uw telefoongesprek kan worden gemonitord en opgenomen om de kwaliteit van onze service te verbeteren. Telefoongesprekken naar 0800-nummers zijn gratis vanuit eigen land, maar andere netwerken kunnen kosten in rekening brengen.

©2024 Insulet Corporation. Omnipod en het Omnipod-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en andere rechtsgebieden. Glooko is een handelsmerk van Glooko, Inc. en wordt gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Nederland. INS-OHS-01-2024-00118 V2