



Ondersteuning van patiënten die starten met Omnipod® 5

omnipod
automated insulin
delivery system

5

Bedankt dat u hebt gekozen voor het Omnipod 5 Geautomatiseerde Insulinetoedieningssysteem, geïntegreerd met toonaangevende sensormerken*.



Deze brochure is ontwikkeld om u te voorzien van de belangrijkste informatie ter ondersteuning van uw patiënten bij een succesvolle start met Omnipod 5.



*Compatibel met de Dexcom G6- en FreeStyle Libre 2 Plus-sensors.

Voorafgaand aan de training

Indien uw patiënt Dexcom G6* gebruikt

Patiënten die gebruikmaken van Dexcom G6 moeten een actieve sensor dragen naar hun trainingsafspraak. Voordat uw patiënt start met het Omnipod 5-systeem, moet hij/zij de Dexcom G6 met de Dexcom G6-app gebruiken op een compatibele smartphone. Uw patiënt zal de Dexcom-ontvanger niet kunnen gebruiken. Vraag de patiënt om de Dexcom G6-app voor iOS of Android te downloaden.

Indien uw patiënt FreeStyle Libre 2 Plus* gebruikt

Uw patiënt moet een nieuwe, ongeopende FreeStyle Libre 2 Plus-sensor meebrengen om mee te starten tijdens de training. Zorg ervoor dat uw patiënt training heeft ontvangen over het gebruik van de FreeStyle Libre 2- of FreeStyle Libre 2 Plus-sensor. Zorg ervoor dat de FreeStyle Libre 2 Plus is aangevraagd voor uw patiënt.

*Voor de sensors dient u apart een aanvraag te doen.

Omnipod 5-startproces

Zodra de Omnipod 5-aanvraag is goedgekeurd, ontvangt uw patiënt een e-mail van Insulet met een link om de online start van zijn/haar Omnipod 5-proces te voltooien. Dit proces kan worden voltooid op een computer of mobiele telefoon.

Uw patiënt moet de online start van het Omnipod 5-proces voltooien voorafgaand aan de Omnipod 5-producttraining. Hiervoor moet de patiënt zich aanmelden met een Omnipod-ID of deze maken en de toestemmingsschermen voltooien, waarop we uw patiënt informatie geven over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.



Bezig met verbinden met Glooko®

In de start van het Omnipod 5-proces raden we uw patiënten aan om hun Omnipod-ID te koppelen aan hun Glooko-account. In deze fase kan een Glooko-account worden gemaakt.

Met Glooko kan uw patiënt:

- zijn/haar glucose- en insulinegegevens inzien.
- zijn/haar diabetesgegevens met u delen, waarvoor u de ProConnect-code van uw kliniek moet delen.



Vorbereiding op de training

Beveel uw patiënt aan om de instructiesvideos op www.omnipod.com/omnipod-5-hulpbronnen te bekijken om zich voor te bereiden op de producttraining.

Verwachtingen stellen

Net als bij andere AID-systemen is het belangrijk dat u uw patiënten realistische verwachtingen geeft voorafgaand aan het starten met Omnipod 5.

Uw patiënten kunnen meteen starten in de Geautomatiseerde Modus, maar het kan enkele weken duren voordat volledige optimalisatie wordt bereikt. Omnipod 5 blijft zich aanpassen aan de behoeften van uw patiënt op basis van de geschiedenis van insulinebehoeften.

Zorg ervoor dat uw patiënten voorafgaand aan de start bekend zijn met de volgende vereisten:

- ✓ Er moeten een bolus worden toegediend voor de koolhydraatname bij maaltijden en snacks om postprandiale hyperglykemie te minimaliseren.
- ✓ De pod en sensor moeten kunnen worden vervangen.
- ✓ Er moet worden gereageerd op signalen en alarmen.

Producttraining

Behandelingsbegeleiding voorafgaand aan de start

Begeleid uw patiënt met betrekking tot eventuele wijzigingen in de huidige behandeling ter voorbereiding op het starten met Omnipod 5.

Sensors

Dexcom G6-sensor

Uw patiënt moet een actieve Dexcom G6-sensor bij de training dragen met gebruik van de Dexcom G6-app op een compatibele smartphone. Vraag uw patiënt om zijn/haar Dexcom G6-ontvanger uit te schakelen.

FreeStyle Libre 2 Plus-sensor

Als uw patiënt op dit moment een FreeStyle Libre 2- of FreeStyle Libre 2 Plus-sensor gebruikt, moet hij/zij deze Sensor blijven dragen naar de Omnipod 5-training.

Tijdens de Omnipod 5-training moet uw patiënt een nieuwe FreeStyle Libre 2 Plus-sensor activeren. Zorg dat u uw patiënt een voorschrift hebt gegeven voor de FreeStyle Libre 2 Plus-sensor. Uw patiënt moet een nieuwe, ongeopende Sensor meebrengen naar de Omnipod 5-training.

*NovoLog®/NovoRapid®, Humalog®, Trurapi®/Insuline aspart Sanofi®, Kirsty® en Admelog®/Insuline lispro Sanofi® zijn compatibel met het Omnipod 5-systeem voor gebruik gedurende maximaal 72 uur (3 dagen).

Starterskit

Zorg ervoor dat de patiënt de Omnipod 5-starterskit en doos met Omnipod 5-pods meeneemt naar de producttraining. De Omnipod 5-starterskit en Omnipod 5-pods worden naar het huis van uw patiënt verzonden. Vergeet niet om te controleren of er een flacon compatibele snelwerkende insuline is voorgeschreven*.






Ondersteuning na de training

Uw patiënt kan op www.omnipod.com/omnipod-5-hulpbronnen meerdere bronnen raadplegen om het maximale uit Omnipod 5 te halen, waaronder:

- ✓ Probleemoplossing
- ✓ Omnipod 5 handige tips
- ✓ Algoritmevideo

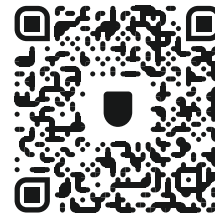

Scan hier om de bronnen te openen



Neem contact op met uw plaatselijke Insulet-team indien u vragen hebt over zorgoptimalisatie.

©2024 Insulet Corporation. Omnipod, het Omnipod-logo, Simplify Life en Podder zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en andere rechtsgebieden. Alle rechten voorbehouden. Dexcom en Dexcom G6 zijn geregistreerde handelsmerken van Dexcom, Inc. en worden gebruikt met toestemming. De sensorbehuizing, FreeStyle, Libre, en gerelateerde merkaanduidingen zijn eigendom van Abbott en gebruikt met toestemming. Glooko is een handelsmerk van Glooko, Inc. en wordt gebruikt met toestemming. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Nederland. INS-OHS-01-2024-00119 V3

